



Weinbergerzugvorrichtung

Regulärer Preis:

1.690,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen

Produktinformationen "Weinbergerzugvorrichtung"

Zugvorrichtung für Weinbergerrfessel.

Dieses Humerus-Set dient dazu, den Oberarm eines seitlich liegenden Patienten zu positionieren und einen gebrochenen Unterarm in die gewünschte Lage zu bringen. Die Finger des Patienten werden in einer festen Position mit der Handfessel gehalten. Die Armstütze und die Zugvorrichtung werden mit Hilfe von drehbaren Klemmen mit dem Operationstisch verbunden. Eine grobe Positionierung erfolgt, indem man die Zugvorrichtung in die Hülse hineinzieht, die Position arretiert und dann die endgültige Einstellung durch Drehen der Kurbel vornimmt, bis der gebrochene Arm in der richtigen Position ist.

Folgende Verstellungen sind möglich:

Grobverstellung: 200 mm

Feinverstellung: 200 mm

Verstellwinkel Handzug: 40°

Drehbarer Handgriff: 360°

Maße und Gewichte

- Breite: 680 mm
- Höhe: 820 mm
- Belastung: 20 Kg (entspricht einem Patientengewicht von 200 kg)
- Polster: 80 x 295 mm (Ø x L)
- Lieferung ohne Handfessel und Kloben

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-399
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

